



Gebrauchsanweisung

Langzeit-EKG


1 Sicherheit

2 Hardware

3 Software

4 Hygiene

Teil 4: Hygiene und Desinfektion für custo flash 500/510/510V/501/501L

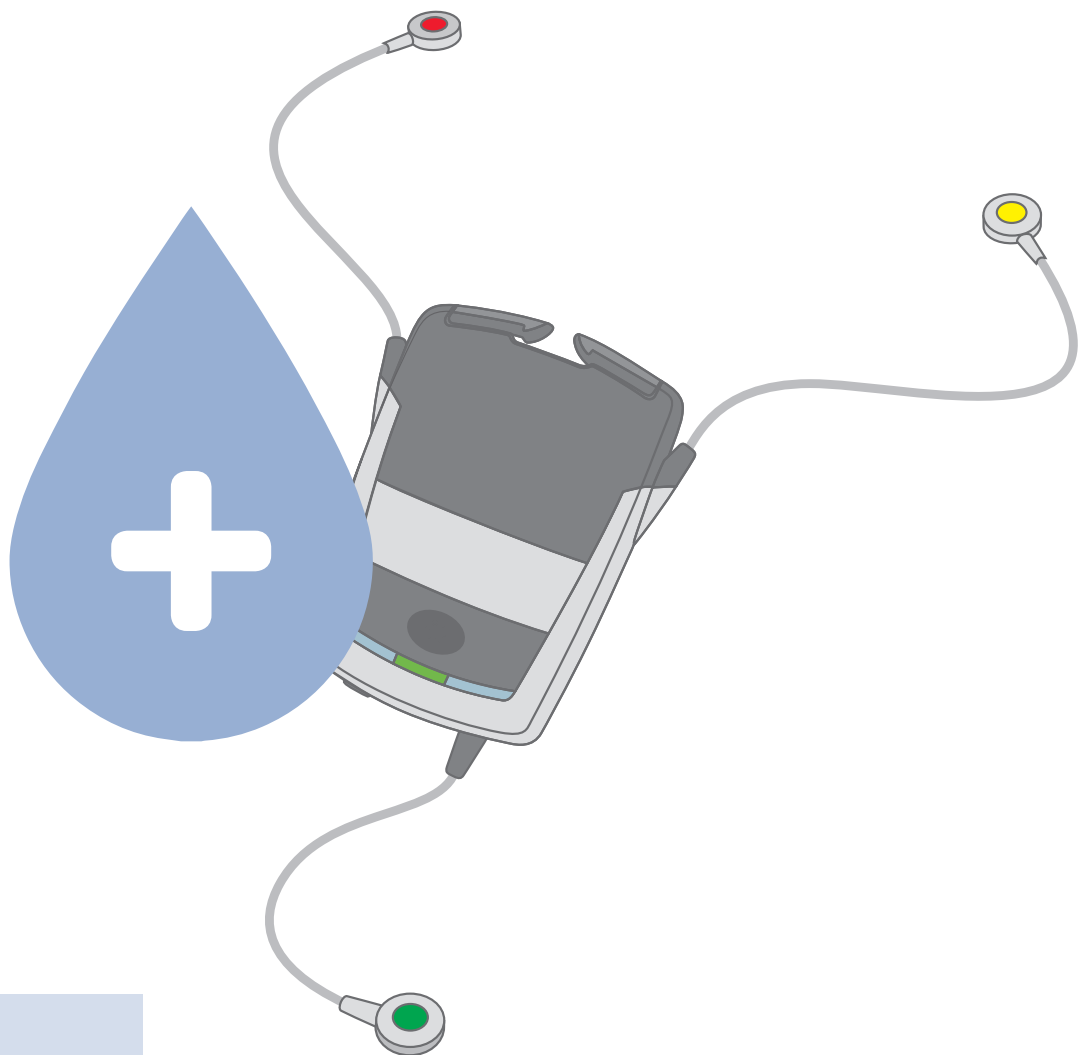

Eigenschaften:

für custo flash 5xxx
mit custo diagnostic

MHY 0005 – DK 1706
Version 001 – 16.08.2017

CE 0123

 **custo·med**
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK



© 2017 custo med GmbH

Wir weisen darauf hin, dass ohne vorherige schriftliche Zustimmung der custo med GmbH diese Gebrauchsanweisung weder teilweise noch vollständig kopiert, auf anderem Wege vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden darf.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung ohne Ankündigung zu verändern. Die aktuelle Version kann auf unserer Internetseite heruntergeladen werden: www.customed.de.

ACHTUNG:

Diese Gebrauchsanweisung ist Teil eines modularen Systems, bestehend aus vier Teilen. Um eine vollständige Gebrauchsanweisung zu haben, müssen alle vier Teile aus dem Internet oder von CD heruntergeladen werden.



Gebrauchsanweisung

Langzeit-EKG

1 Sicherheit

2 Hardware

3 Software

4 Hygiene

Teil 4: Hygiene und Desinfektion für custo flash 500/510/510V/501/501L

Inhaltsverzeichnis

4.1	Wichtige Hinweise.....	4
4.2	Desinfektion custo flash 500/510/510V/501/501L.....	4
4.3	Desinfektion Tragetasche und Gürtel	4
4.3	Reinigung Akkuladeschale.....	4
4.5	Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel	5
4.6	Entsorgung von kontaminierten Verbrauchsmaterialien.....	5
	Reinigungsübersicht auf einen Blick	6

4.1 Wichtige Hinweise

Verwenden Sie nur von custo med empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nicht geeignete Mittel können das Gerät beschädigen.

Unter keinen Umständen dürfen die Geräte in Flüssigkeit getaucht oder zu nass gereinigt werden. Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht direkt auf oder in das Gerät gesprüht werden. Es darf keine Feuchtigkeit ins Innere der Geräte gelangen (z.B. über Schnittstellenkontakte).

Kontakte dürfen nicht verschmutzt oder beschädigt werden.

Reinigen und desinfizieren Sie die Geräte nach jedem Patientenwechsel. Achten Sie darauf, dass die Geräte von außen immer ästhetisch und sauber sind.

Das Gerät darf beim Reinigen und Desinfizieren nicht an einer Spannungsquelle angeschlossen sein.

4.2 Desinfektion custo flash 500/510/510V/501/501L

- Aufbereitungsart: Wischdesinfektion

4.3 Desinfektion Tragetasche und Gürtel

- Aufbereitungsart: desinfizierendes Waschen im Waschnet

4.4 Reinigung Akkuladeschale

- Aufbereitungsart: Gerät trocken mit weichem, fussselfreiem Tuch abwischen.

4.5 Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Wischdesinfektion:

Meliseptol® Wipes sensitive (B.Braun)

Meliseptol® Foam pure (B.Braun) – (dazu weiches, fusselreies Tuch verwenden)

- Hinweis: Bitte Herstellervorgaben beachten

Desinfizierendes Waschen:

Eltra 40® (ECOLAB)

Eltra 40® Extra (ECOLAB)

- Hinweis: Bitte Herstellervorgaben beachten



Maschinenwäsche 40°C im Waschnetz, (nicht schleudern)



Nicht mit scharfen Chemikalien bzw. Bleiche behandeln



Nicht bügeln



Nicht im Trockner trocknen

-
- Hinweis: Die empfohlenen Desinfektionsmittel können durch Produkte anderer Hersteller ersetzt werden, sofern diese gleichwertig bzgl. Desinfektion und Materialverträglichkeit sind. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Partner für Hygiene & Desinfektion.

4.6 Entsorgung von kontaminierten Verbrauchsmaterialien

Kontaminierte Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Klebeelektroden (Einmalartikel) sind Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden. Diese müssen sicher und sachgerecht entsorgt werden. Beachten Sie dabei das Infektionsschutzgesetz und die gesetzlichen Vorgaben zur Entsorgung von kontaminierten Verbrauchsmaterialien.



Reinigungsübersicht auf einen Blick

Produkt	Wischdesinfektion	desinfizierendes Waschen	Sonstiges
custo cardio 100/110/130/300	X		
custo cardio 200 und Elektroden			S
custo screen 300/400/pediatric	X		
Blutdruckmanschette			S
custo flash 500/510/510V/501/501L	X		
custo watch	X		
custo kybe	X		
custo guard	X		
custo belt Elektrodengürtel		X	
custo belt extender		X	
custo EKG-Kabel guard 3 / Kabeladapter	X		
custo spiro mobile			S
Tragetaschen, Tragegürtel, Nackengurte		X	

S Spezielle Aufbereitung nötig – mehr Informationen finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung

Kontaktdaten des Herstellers:

custo med GmbH
 Maria-Merian-Straße 6
 85521 Ottobrunn
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 710 98 - 00
 Fax: +49 (0) 89 710 98 - 10
 E-Mail: info@customed.de
 Internet: www.customed.de

